



SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INSTRUCCIÓN TÉCNICA

LIMPIEZA y DESINFECCIÓN CÁMARA ESPACIADORA

Ed 01
Febrero 2012

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS IV

MEDICINA PREVENTIVA y SALUD PÚBLICA

Área Sanitaria

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS CÁMARAS ESPACIADORAS UTILIZADAS EN EL AREA DE GESTION CLÍNICA DE PEDIATRÍA



Definición:

- Limpieza y desinfección de las cámaras espaciadoras.



Objetivos:

- Asegurar la correcta limpieza y desinfección de las cámaras espaciadoras.



Requisitos previos:

- Seguir las condiciones del fabricante.
- Que la cámara espaciadora **NO** sea de uso individual.



Recursos y material:

- Auxiliar de Enfermería.
- Detergente Enzimático: **INSTRUNET® EZ+T**.
- Desinfectante de alto nivel: **INSTRUNET F.A. CONCENTRADO®**.



Procedimiento:

Acciones

LIMPIEZA:

- Desmontar las distintas partes de las cámaras espaciadoras, según instrucciones del fabricante.
- Aclarar en agua fría.
- Limpiar y sumergir las piezas en agua caliente que contenga **INSTRUNET® EZ+T**, diluido: 8 ml. en 1 litro de agua durante **10 minutos**. Utilizar una nueva dilución para cada uso.
- Aclarar en agua templada.
- Dejar secar todos los componentes.

DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL:

- Introducir todas las partes en 20 ml de **INSTRUNET F.A. CONCENTRADO®** diluido en 980 ml. de agua, durante **15 minutos**. (Esta solución se podrá usar durante 15 días o 30 usos).
- Aclarar con agua estéril o agua de un grifo que tenga un filtro de retención de partículas y microorganismos.
- Dejar secar al aire.
-



Complicaciones:

- No están descritas.



Bibliografía:

- *Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008*. Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC)
- *Segura B. V. Descontaminación de Instrumental. Guía Práctica. 2006.*



SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INSTRUCCIÓN TÉCNICA

LIMPIEZA y DESINFECCIÓN CÁMARA ESPACIADORA

Ed 01
Febrero 2012

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

IV

MEDICINA PREVENTIVA y SALUD PÚBLICA

Área Sanitaria

PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

INSTRUNET® EZ+T

- **Proveedor:** Laboratorios INIBSA.
- **Código de Artículo:** 2100565.



INSTRUNET F.A. CONCENTRADO®:

- **Proveedor:** Laboratorios INIBSA.
- **Código de Artículo:** 2100521.

